

EASY Bone Scraper

Скребок костный стоматологический

СЕРИЯ
EASY

● Аутокость

Особенности и преимущества

Поворотное лезвие

Для обеспечения эффективной работы скребка, лезвие в форме зонтика можно легко повернуть вокруг своей оси острой стороной.


Встроенная отвертка

Для поворота лезвия не требуются дополнительные специальные инструменты.

Неограниченный срок годности

Костные скребки KARL FRITZ® Easy Bone Scraper поставляются нестерильными, поэтому нет необходимости определять срок, по истечении которого они считаются непригодными для использования по назначению.

Стойкость заточки лезвия обеспечена специальным режимом закаливания сплава стали SUS420J2

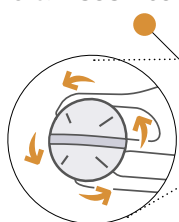

● Визуальный контроль количества аутокости благодаря прозрачному поликарбонату

**NON
STERILE**

● Эргономичный корпус особой формы для работы во фронтальном и дистальном отделах

Лезвие в форме зонтика можно легко повернуть острой стороной, вставив в плоский паз плоскую отвертку, встроенную в рукоятку



Скребок костный стоматологический Easy Bone Scraper*

3500

↔ 15 см

5 шт./упак.

EASY



Карточка товара
в Интернет-магазине

Общая длина 15,0 см. Лезвие Ø7 мм.

Для забора аутокостных фрагментов в виде стружки.

Объем аутокостных фрагментов 0,25–0,5 см³.

Подготовка скребка к операции

- 1 Извлеките скребок из потребительской упаковки. Не используйте скребок, если упаковка повреждена, открыта или получила загрязнения.
- 2 Проведите визуальный осмотр инструмента на наличие дефектов.
- 3 Проведите стерилизацию паром в автоклаве при температуре 134 °C в течение 15 минут с последующей сушкой в течение 30 минут.



Внимание!


Поставляются нестерильными.

Перед применением необходимо простерилизовать.




Порядок применения

- 1 Скребок должен контактировать только со стерильными поверхностями.
- 2 Установите лезвие на поверхность кортикальной кости так, чтобы вход в накопительную камеру был обращен к костной ткани, затем произведите забор аутокостных фрагментов, двигая скребок в сторону рукоятки.
- 3 Для извлечения аутокостных фрагментов, осторожно сдвиньте крышку накопительной камеры.
- 4 Если лезвие скребка затупилось во время использования, поверните его острой частью при помощи встроенной в рукоятку отверткой с плоским шлицем.

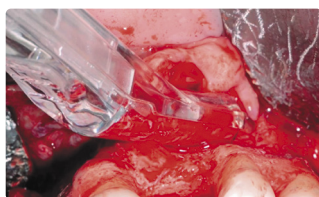

Процесс забора
аутокостных фрагментов

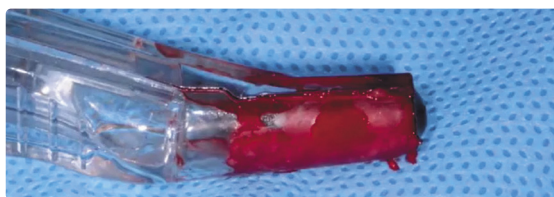

Скребок с наполненной накопительной камерой.
Количество собранных аутокостных фрагментов
четко визуализируется



Аутокостные фрагменты
выгружены в емкость
для приготовления графта



Внимание!

Допускается использование скребка в течение одной операции на одном пациенте до 4 раз.
Повторное применение скребка KARL FRITZ® Easy Bone Scraper для последующих операций категорически недопустимо.

*Зарегистрирован в России как «Скребок костный стоматологический Karl Fritz® Easy Bone Scraper, арт. 3500 – 5 шт./уп.».

